



Ciśnieniomierz naramienny Pempa BP200

Ciśnieniomierz Pempa jest nowoczesnym urządzeniem, z dużym dotykowym ekranem. Posiada funkcję wykrywania migotania przedsionków i arytmii. Jest prosty i intuicyjny w obsłudze.

Cena: ~~172,99 zł~~ Original price was: 172,99 zł, 160,99 zł Current price is: 160,99 zł.

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#), [Popularne](#), [Promocja](#)

Ciśnieniomierz naramienny automatyczny Pempa BP200

Zdrowie to najważniejszy składnik pełnego życia. Ciśnieniomierz BP200 to niezawodny partner w dbałości o zdrowie serca i układu krwionośnego.

Kluczowe cechy produktu:

- **Automatyczna technologia** – nowoczesny ciśnieniomierz BP200 automatycznie nadmucha mankiety i dokona pomiaru, eliminując błędy związane z ręcznym pompowaniem.
- **Dokładność i precyzja** – zaawansowane czujniki gwarantują dokładność pomiarów zgodnie z międzynarodowymi standardami.
- **Intuicyjny wyświetlacz** – duże, czytelny ekran LCD zapewnia łatwy odczyt wyników oraz wskaźników arytmii czy niewłaściwego umiejscowienia maniektu.

- **Pamięć pomiarów** – funkcja zapisywania i przeglądania ostatnich 60 pomiarów pozwala monitorować trendy i postępy w zdrowiu serca w dłuższej perspektywie.
- **Wszechstronność** – dzięki regulowanemu mankietowi urządzenie dopasowuje się do różnych rozmiarów ramion, oferując komfort podczas pomiaru.
- **Sygnalizacja kolorystyczna** – system kolorów informuje o poziomie ciśnienia – zielony oznacza normę, żółty wskazuje na podwyższone ciśnienie, natomiast czerwony sygnalizuje wartości krytyczne.
- **Energooszczędność** – funkcja automatycznego wyłączenia po 1 minucie nieaktywności.

Przeprowadzanie pomiaru ciśnieniomierzem: Bezpośrednio przed dokonaniem pomiaru należy unikać jedzenia, palenia tytoniu oraz wszelkich form wysiłku. Wszystkie te czynności mają wpływ na wynik pomiaru. Należy znaleźć czas na relaks, siedząc np. w fotelu w spokojnej atmosferze przez około 10 minut przed pomiarem. Ciśnienie należy mierzyć zawsze na tym samym ramieniu – zazwyczaj lewym. Staraj się dokonywać pomiarów regularnie, o tej samej porze dnia, ponieważ ciśnienie krwi jest zmienne w ciągu dnia.
