



Test ciążowy strumieniowy - super czuły

Strumieniowy test ciążowy PINK to niezawodne narzędzie dla każdej kobiety podejrzewającej ciążę. Dzięki swojej innowacyjnej technologii strumieniowej, jest niezwykle łatwy do użycia - wystarczy skierować go pod strumień moczu, aby uzyskać wynik. Oferuje szybkie, 99% dokładne wyniki, pozwalając z łatwością monitorować potencjalną ciążę. W dodatku, jego kompaktowy design czyni go dyskretnym i łatwym do przechowania.

Cena: Od 4,25 zł

Kategorie: [Testy ciążowe](#)

Test ciążowy strumieniowy PINK super czuły

Test ciążowy PINK to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które zapewnia szybkie i niezawodne wyniki ciąży z wygodą domowego użytku - służy do wykrywania wczesnej ciąży. Ten innowacyjny test wykorzystuje unikalną technologię strumieniową, która pozwala na prostą i higieniczną procedurę testowania - wystarczy skierować test pod strumień moczu. Test

PINK jest skuteczny w 99% przypadków, dając Ci pewność, której potrzebujesz. Można go użyć już od pierwszego dnia opóźnienia miesiączki, co pozwala na jak najszybsze potwierdzenie ewentualnej ciąży. Wyniki są łatwe do odczytania i pojawiają się zaledwie w ciągu kilku minut. Pozwala on na wykrycie ciąży na podstawie stężenia hormonów w moczu kobiet w ciąży. Kompaktowy rozmiar i dyskretny design testu ciążowego strumieniowego PINK sprawiają, że jest on łatwy do przechowywania i doskonały do użytkowania w prywatności domu. Dzięki temu testowi, odkrycie ciąży nigdy nie będzie łatwiejsze. **Test jest wyrobem medycznym przeznaczony do samodzielnego wykrywania ciąży i należy używać go zgodnie z instrukcją. Produkt przeznaczony jest do szybkich i prostych domowych testów i jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem. Pamiętaj, żeby odpowiednio zapoznać się z jego budową przed użyciem.**

Skład opakowania - test ciążowy PINK super czuły:

- 1 foliowa szczelnie zamknięta koperta, w której znajduje się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć
- instrukcja wykonania testu

Używając nowego testu ciążowego, należy wyrzucić 1 szt. środka pochłaniającego wilgoć - nie jest to element niezbędny do wykonania testu.

Jak poprawnie wykonać strumieniowy test ciążowy?

Test ciążowy PINK strumieniowy super czuły to szybki test, który można zrobić w domu. Do wykonania badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ posiada on w sobie najwięcej hormonu hCG (ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej).

1. Przed wykonaniem badania wyjmij test strumieniowy i zapoznaj się z instrukcją. Z kopertki wyjmij test strumieniowy i środek pochłaniający wilgoć, który możesz wyrzucić do śmieci.
2. Zdejmij nasadkę i skieruj końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund.
3. Po upływie określonego czasu, nałóż z powrotem nasadkę i umieść test na poziomej powierzchni. Ważne, żeby widoczne były obydwa okienka testu. Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Należy odczekać odpowiedni czas, żeby pojawił się wynik testu w postaci barwnych prążków w okienku. Możliwe jest również zebranie moczu do suchego i czystego naczynia i zamoczenie testu w pojemniku - podobnie jak w przypadku płytkowych testów.
4. Wynik testu odczytaj w czasie 1-4 minut od momentu wyjęcia końcówki testu z badanego moczu. Jeżeli nie ma barwnych prążków w okienku wynikowym, odczekaj jeszcze minutkę. Odczekaj aż w okienkach pojawią się barwne prążki. Jeżeli otrzymasz wynik po czasie dłuższym niż 10 minut, to wyniku nie należy brać pod uwagę.

Wynik w postaci barwnych prążków uzyskamy tylko, jeżeli test został wykonany prawidłowo.

- **wynik negatywny** - wynik jest negatywny, gdy w okienku pojawia się pasek kontrolny C oraz jest brak paska testowego T, taki wynik można interpretować, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży
- **wynik pozytywny** - wynik jest dodatni, gdy pojawiają się dwie wyraźne kreski zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C, należy udać się do specjalisty, żeby potwierdzić ten stan
- **wynik nieważny** - wynik można uznać za nieważny, jeżeli w okienku nie pojawił się żaden pasek, w celu otrzymania wyniku należy powtórzyć badanie

Zalety super czułych testów ciążowych strumieniowych:

- **Szybkość i łatwość użycia** – testy strumieniowe nie wymagają skomplikowanych procedur – wystarczy skierować test pod strumień moczu.
- **Natychmiastowe wyniki** – większość testów strumieniowych dostarcza wyniki w ciągu kilku minut.
- **Wysoka precyzja** – testy ciążowe strumieniowe są bardzo dokładne, często ze skutecznością sięgającą 99%.
- **Dyskrecja** – testy strumieniowe są małe, przenośne i można je używać w prywatności własnego domu.
- **Możliwość wczesnego testowania** – niektóre testy ciążowe strumieniowe można używać już od pierwszego dnia opóźnienia miesiączki.
- **Czystość i higiena** – dzięki technologii strumieniowej, testy są mniej “bałaganiarskie” i bardziej higieniczne w użyciu.
- **Łatwość odczytu wyników** – wyniki testu są proste do odczytania, zwykle poprzez wyraźny wskaźnik plus/minus lub kolorowe linie.
- **Komfort** – nie wymaga używania dodatkowych pojemników, co czyni je wygodniejszymi w stosowaniu.

Testy ciążowe mają na celu wykrycie obecności hormonu ciążowego w moczu kobiety. Istnieje kilka rodzajów testów:

- **Test ciążowy strumieniowy** – ten rodzaj testu jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Wielu użytkowników uważa go za najczystsze i najłatwiejsze do użycia. Wyniki są zazwyczaj dostępne w ciągu kilku minut.
- **Test ciążowy płytkowy** – ten test zazwyczaj składa się z małej płytki, na której znajduje się otwór lub studzienka, do której należy wprowadzić kilka kropli moczu przy użyciu pipety.
- **Test ciążowy paskowy** – jest najprostszym i najtańszym testem ciążowym. Pasek jest zanurzany w naczyniu z moczem przez określony czas. Pomimo tego, że są one mało wygodne w użyciu, nadal pozwalają na precyzyjne wyniki, jeżeli są stosowane prawidłowo.