



Strzykawka do zbioru siary 1ml z nakładką

Strzykawka od Sterifeed jest świetną alternatywa dla karmienia butelką. Pozwala na precyzyjne odmierzanie ilości pokarmu. Zawiera korek, którym można zabezpieczyć strzykawkę i bezpiecznie przechowywać.

Cena: Od 2,89 zł

Kategorie: [Pojemniki na siarę](#), [Promocja](#)

Strzykawka do zbioru siary

Siara to pierwsze mleko matki, które dostarcza noworodkom kluczowe składniki odżywcze i przeciwciała. Dbając o to, aby nie utracić kropli tego cennego płynu, firma Sterifeed przedstawia specjalnie zaprojektowaną strzykawkę do zbioru siary z nakładką o pojemności 1ml.

Zalety produktu:

- **Precyzyjne zbieranie siary** – dzięki precyzyjnie zaprojektowanej strzykawce zbieranie siary jest proste i wygodne, a nade wszystko bezpieczne.
- **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu** – strzykawka jest wykonana z materiałów wolnych od BPA i gwarantują bezpieczeństwo dla Twojego maluszka.
- **Nakładka ochronna** – w zestawie znajduje się nakładka, która chroni zgromadzoną siarę przed zanieczyszczeniami i innymi drobnoustrojami.
- **Ergonomiczny design** – lekka, kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodne i higieniczne przechowywanie zgromadzonej siary.

- **Jednorazowe użycie** – zapewnia, że siara będzie zawsze świeża
- **Sterylna** – zapakowana w sterylne opakowanie i gotowa do bezpośredniego użyciu.

Dlaczego warto wybrać strzykawkę Sterifeed?

Zbieranie siary, zwłaszcza jeśli w pierwszych dniach po porodzie może być wyzwaniem. Strzykawka od Sterifeed została stworzona z myślą o potrzebach młodych mam, umożliwiając łatwe, higieniczne i efektywne zgromadzenie tego cennego płynu dla niemowlęcia. Nasza strzykawka z nakładką to bezpieczny produkt dla każdej mamy w pierwszych dniach karmienia piersią. Gwarantuje ona bezpieczne i higieniczne zbieranie siary, minimalizując ryzyko jej rozlania czy zanieczyszczenia. Wybierając produkty marki Sterifeed, stawiasz na jakość i dobro swojego dziecka. **UWAGA:**

- Ten produkt nie nadaje się do podawania siary bezpośrednio do ust niemowlęcia ze względu na ryzyko zadławienia, jeśli przed użyciem nie zostanie zdjęta fioletowa nasadka.
- Do stosowania wyłącznie pod nadzorem personelu medycznego. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Tylko do jednorazowego użyciu. Nie można jest ponownie sterylizować.
- Wszystkie elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z agresywnymi chemikaliami.
- Nie przechowywać w bezpośrednim świetle słonecznym. Przechowywać w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
- Nie łączyć z innymi urządzeniami/przedmiotami.

Wskazówki przed użyciem strzykawki do zbioru siary:

- Wyjmij kolektor siary z opakowania.
- Zachowaj opakowanie na przyszłość.

- Sprawdź wszystkie elementy przed użyciem. Produkt należy wyrzucić, jeśli widoczne są jakiegokolwiek niedoskonałości.
- Zdejmij nasadkę przed użyciem.
- Używaj pod nadzorem pracownika służby zdrowia do pozyskiwania siary i odpowiednio ją przechowywać.
- Po użyciu załóż nasadkę.

Strzykawka do zbioru siary nie nadaje się do podawania siary bezpośrednio do ust niemowlęcia ze względu na ryzyko zadławienia, jeśli przed użyciem nie zostanie zdjęta fioletowa nasadka. Bezwzględnie należy wykonać tę czynność przed użyciem strzykawki do zbioru siary. Uwaga: Firma Medicare Colgate udziela gwarancji na te produkty, tylko jeśli są one używane zgodnie z powyższymi instrukcjami. Medicare Colgate nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia i nie będzie wymieniać, ani zwracać kosztów za szkody spowodowane użyciem tego produktu w jakiegokolwiek inny sposób.
